



# FREZER DENTAL & MEDİKAL

## Döner Alet Çözümleri



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

### DÖNER ALETLER İÇİN ÖNERİLEN HIZ ARALIKLARI

Önerilen Operasyonel hız: Şekillendirme işlemi için önerilen dk/devir sayısını gösterir.

Müsaade edilen maksimum hız: Temas olmadan müsaade edilen maksimum dk/devir sayısını gösterir.

<b>AERATÖR FG İÇİN ELMAS KAPLI ALETLER</b>		
<i>*Önerilen hızlar <b>Mavi kuşak, Siyah kuşak ve Yeşil kuşaklı</b> elmas kaplı aletler için geçerlidir.</i>		
ALET KAFA ÇAPI (ISO)	(ÖNERİLEN) OPERASYONEL HIZ (RPM)	MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM HIZ (RPM)
007-010	100.000-220.000	450.000
012-015	70.000-220.000	450.000
016-019	55.000-160.000	450.000
020-024	40.000-120.000	300.000
025-027	35.000-110.000	160.000
029-031	30.000-95.000	140.000
033-040	25.000-75.000	120.000
042-050	15.000-60.000	90.000

<b>*Önerilen hızlar <b>Kırmızı kuşak, Sarı kuşak ve Beyaz kuşaklı</b> elmas kaplı aletler için geçerlidir.</b>		
KUŞAK RENGİ	(ÖNERİLEN) OPERASYONEL HIZ (RPM)	MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM HIZ (RPM)
KIRMIZI KUŞAK	10.000-20.000	40.000
SARI KUŞAK	8.000-15.000	30.000
BEYAZ KUŞAK	5.000-10.000	20.000

<b>*Z-CUT Elmas kaplı Aletler ( Zirkonyum kesme, şekillendirme )</b>		
ALET KAFA ÇAPI (ISO)	(ÖNERİLEN) OPERASYONEL HIZ (RPM)	MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM HIZ (RPM)
Hepsi	200.000	200.000

<b>*Pedodonti için Elmas kaplı aletler</b>		
AÇIKLAMA	(ÖNERİLEN) OPERASYONEL HIZ (RPM)	MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM HIZ (RPM)
Hepsi	160.000	300.000

<b>*Angldurva için Döner Aletler RA/CA</b>	
KUŞAK RENGİ	MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM HIZ (RPM)
SİYAH ; YEŞİL ; MAVİ ; KIRMIZI	40.000
SARI	30.000
BEYAZ	20.000

<b>*Periodonti için özel üretilmiş Döner Aletler</b>		
KOD	(ÖNERİLEN) OPERASYONEL HIZ (RPM)	MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM HIZ (RPM)
831 ; 831L ;832 ; 832L RAL/RAXL	12.000	30.000

\*Profesyonel kullanıcılar için belirtilen hızlar Döner aletlerin içinde bulunduğu Blister,kutularının arkasında bulunmaktadır.

### ÖNERİLEN HIZ ARALIKLARI

#### Önerilen Hızlar

- \*Önerilen hızlar esasen, aletlerin çalışma çaplarında göre optimum sonuçlarının elde edilmesi içindir.  
\*Güvenlik sebebiyle maximum hızların aşılmaması gerekir.

KOD	ALET	(ÖNERİLEN) OPERASYONEL HIZ (RPM)	MÜSAADE EDİLEN MAKSİMUM HIZ (RPM)
KAFA ÇAPI (ISO)	AÇIKLAMA		
<b>KRON KESİCİ</b>			
H34L / H34L / FG		160.000	300.000
H4KMK / FG		160.000	300.000
H4KMKL / FGL		160.000	300.000
G5114-RA		15.000-40.000	40.000
<b>TUNGSTEN KARBİD FREZ</b>			
MF-Cut / FG		60.000	160.000
MF-Cut / FG		160.000	300.000
MF-Cut / RA 005-023		5.000-40.000	40.000
MF-Cut / RA 29		5.000-30.000	30.000
H1S/H1SX/H1SXN/FG/FGXL	006-016	160.000	300.000
H1S/H1SX/H1SXN/FG/FGXL	018-023	160.000	200.000
H1S/H1SX/H1SXN/RA/RAL		8.000-10.000	40.000
<b>KARBİD BİTİRME FREZLERİ</b>			
FG		160.000	300.000
H375R FG 016'YA KADAR		160.000	200.000
H41 FG 014-023		160.000	300.000
RA		30.000	40.000
<b>SERAMİK BİTİRME ALETLERİ</b>			
FG		160.000	300.000
HP		25.000	50.000
<b>DOLGU VE BONDİNG RESİN KALDIRICI</b>			
FG		160.000	300.000
RA		30.000	40.000
<b>PERIODONTOLOJİ İÇİN ÖZEL ALETLER</b>			
H747 / H747L	RAL/RAXL	12.000	30.000
H758 / H758L	RA/RAXL	12.000	30.000
<b>CERRAHİ ALETLER</b>			
DOKU DÜZENLEYİCİ			
TISSUE TRIMMER 249-016;250-016	/ FG	300.000-500.000	500.000
HP/HPL/RAL/RAXL		1.500-3.000	3.000
FGXXL 008-010		100.000	160.000
FGXL 010-012-014		100.000	160.000
FGXL 016		75.000	160.000
H269-016-FGXXL		75.000	160.000
H267-016-FGXL		75.000	160.000

FGXL 018	75.000	160.000
FGXL 021-023	50.000	160.000
<b>LINDEMAN KEMİK KESİCİLER</b>	.	.
HP/RAL/RAXL	1.500	3.000
FGXL RF162016-FGXL	75.000	160.000
FGXLH161-016-FGXL	100.000	160.000
FGXLH162-016-FGXL	100.000	160.000
<b>CHIRDIA</b>	.	.
*FG COMPACTA	100.000	200.000
RA COMPACTA	20.000	40.000
HP COMPACTA	10.000-30.000	40.000
*FG SPONGIOSA	30.000	200.000
RA SPONGIOSA	10.000	40.000
HP SPONGIOSA	10.000	40.000
<i>*FG KIRMIZI KUŞAK ANGLDURVA VEYA CERRAHİ TURBİNLER İÇİNDİR.</i>		
<b>PARLATICILAR</b>	.	.
CERAGLAZE YEŞİL	15.000	30.000
CERAGLAZE MAVİ	10.000	30.000
CERAGLAZE SARI	5.000	30.000
NTI		
CERAWHITE/CERAPINK/CERADIA	15.000	30.000
NTI CERASUPERGREY	15.000-20.000	30.000
FLEXIPOL	10.000-12.000	15.000
NTIUNIQUE	5.000-12.000	30.000
NTI DIAGLOSS PEMBE	10.000-12.000	30.000
NTI DIAGLOSS BEYAZ	5.000-7.000	30.000
NTI		
MICRICOMP/MACROCOMP/AMAL		
GAMMASTER	5.000-7.001	30.001
NTI EPSİPOL FG	15.000	30.000
NTI EPSİPOL RA	5.000-7.000	30.000
P0053,P0153	15.000	30.000
NTI UniWhite RA	5.000-7.000	30.000
NTI UniBlack RA	5.000-7.000	30.000
NTI PROPHYLAXEMASTER	5.000	30.000
P1258	2.000	10.000
NTI PROTHETICS P063	15.000	15.000
NTI PROTHETICS P064	15.000	15.000
NTI PROTHETICS P065	15.000	15.000
NTI PROTHETICS P066	15.000	15.000
NTI PROTHETICS P067	15.000	15.000
NTI PROFILAX3	1.500	10.000
P1500/P1501/P1502	3.000	5.000
ARKANSAS TAŞ FG	15.000	15.000
ARKANSAS TAŞ RA	7.000	7.000
SERAMİK AŞINDIRICILAR FG	15.000	15.000
SERAMİK AŞINDIRICILAR RA	7.000	7.000
<b>ENDODONTİ ALETLERİ</b>	.	.
NTI ENDOCLEAN	300	300
GATES,PEESO	450-800	800
KÖK KANAL DRİLLERİ	800	1.200
LENTİLO	800	800
H1SNL RAXL	1.500-2.000	12.000
<b>ÖZEL ALETLER</b>	.	.
*802L 013-016	120.000	200.000
*802L 021	160.000	200.000
*H152 009	120.000	120.000
<i>*UYARI:KIRMIZI KUŞAKLI ANGLDURVA İÇİNDİR.</i>		
<b>POST RESTORASYON SİSTEMLERİ</b>		.

DRILL	500-1.000	1.000
ROOT FACER/HEAD GRINDERS	1.000-1.500	2.000
<b>RETANSİYON PİNLERİ</b>	.	.
RETO PİN, TRISTAR, TRIJET	750	750
W2014, W2003, W2019	1.000	1.000
<b>ÇELİK FREZLER</b>	.	.
005-018	30.000	50.000
021-025	20.000	30.000